

## **Gebruiksaanwijzing BABY MOVER<sup>®</sup> van Baby-Mover B.V.**

**BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN BEWAAR HEM VOOR LATER GEBRUIK.**

### **WAARSCHUWING:**

- u kunt uw evenwicht verliezen door uw eigen bewegingen en die van het kind
- kijk uit als u zich bukt of vooroverbuigt
- gebruik de draagzak niet tijdens sportactiviteiten.

### **Gebruik volgens bestemming:**

De BABY MOVER<sup>®</sup> is een professioneel schort bedoeld om een baby's (van pasgeboren kinderen met een gewicht vanaf 2kg tot maximaal 3 baby's en met maximumgewicht van 9 kg per baby) ingeval van brand of andere calamiteiten te transporteren uit gebouwen en andere opstallen. BABY MOVER<sup>®</sup> is niet geschikt noch bedoeld voor enig ander doel dan hiervoor is aangegeven!

### **Aanwijzingen voor het gebruik**

#### **A. Voor gebruik:**

- Haal de BABY MOVER<sup>®</sup> uit de verpakking en hang op een daartoe aangewezen plaats aldus dat de BABY MOVER<sup>®</sup> ingeval van een calamiteit snel en probleemloos beschikbaar is.
- Bescherm de BABY MOVER<sup>®</sup> tegen vochtigheid, hitte en sterk zonlicht en zorg dat de draagzakken niet permanent worden belast; dit verlengt de levensduur!
- Houdt de BABY MOVER<sup>®</sup> buiten bereik van kinderen en dieren.  
Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de BABY MOVER<sup>®</sup> of gebruik van de BABY MOVER<sup>®</sup> voor ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.
- Doordat de BABY MOVER<sup>®</sup> iedere maand bij oefeningen gebruikt wordt, zal deze na enkele jaren enige slijtage gaan vertonen. Controleer daarom regelmatig of de BABY MOVER<sup>®</sup> geen gebreken heeft of overmatige slijtage.
- Meldt tekortkomingen onverwijld aan BABY MOVER<sup>®</sup> B.V. en probeer deze nimmer zelf te herstellen!
- Oefen (indien mogelijk) ten minste een maal per maand het scenario onder B.

#### **B. In geval van een noodzaak tot het transporteren:**

- Hang de BABY MOVER<sup>®</sup> eerst om en plaats daarna de baby's in de draagzakken; verdeel daarbij het gewicht van de baby's gelijkmatig over de draagzakken.
- Plaats een baby steeds rechtop en met het hoofd naar boven en met het gezicht naar de drager in een draagzak van de BABY MOVER<sup>®</sup>. Het is niet noodzakelijk dat de beentjes door de gaten steken, al zal dit vooral bij grotere baby's prettiger voor de kinderen zijn.

- Sluit een draagzak nimmer geheel af in verband verstikkingsgevaar. Plaats de baby's met het gezicht naar de drager.
- De BABY MOVER<sup>®</sup> is vervaardigd van brandwerend materiaal. Voorkom daarom dat zich op of aan de BABY MOVER<sup>®</sup> of in de draagzakken van de BABY MOVER<sup>®</sup> geen, althans zo weinig als mogelijk brandbaar materiaal bevindt.
- Let op de kinderen tijdens het transport.
- Geen hete dranken of voedingsmiddelen nemen terwijl kinderen gedragen worden.

#### **Wasinstructie:**



#### **Garantie:**

Baby-Mover B.V. garandeert de goede werking van de BABY MOVER<sup>®</sup> en de deugdelijkheid van de gebruikte materialen gedurende vijf jaren vanaf verkoopdatum. De BABY MOVER<sup>®</sup> wordt met grote zorg vervaardigd; zowel de materialen als de constructie zijn uitgebreid getest op hun deugdelijkheid en geschiktheid. De garantie geldt slechts indien bovenstaande aanwijzingen in acht zijn genomen. Ingeval van een tekortkoming is Baby-Mover B.V. gerechtigd om de BABY MOVER<sup>®</sup> te herstellen, te vervangen door een ander exemplaar of tot terugbetaling van de aankoopssom, zulks ter keuze van Baby-Mover B.V. Klachten ter zake tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd, schriftelijk aan Baby-Mover B.V. te worden gemeld, onder toezending van de betreffende BABY MOVER<sup>®</sup> aan Baby-Mover B.V.

De garantie komt door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik te vervallen! De garantie vervalt eveneens indien wijzigingen en herstelwerkzaamheden door anderen dan Baby-Mover B.V. aan de BABY MOVER<sup>®</sup> zijn verricht.

#### **Aansprakelijkheid**

Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de BABY MOVER<sup>®</sup> of gebruik van de BABY MOVER<sup>®</sup> voor ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.

Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet tijdig aan haar zijn gemeld.

#### **Fabrikant:**

Baby-Mover B.V.  
Poppenbouwing 1  
4191 NZ Geldermalsen  
The Netherlands  
Geldermalsen 2026

## Bijlage A: Opslagomstandigheden

### 1. Temperatuur

- Toegestane opslagtemperatuur: +5 °C tot +30 °C
- Kortdurende blootstelling ( $\leq 24$  uur): 0 °C tot +40 °C
- Niet opslaan beneden 0 °C
- Niet opslaan boven 40 °C

Langdurige blootstelling aan verhoogde temperaturen kan de treksterkte van het textiel en de stiksels verminderen. Temperaturen onder het vriespunt kunnen de flexibiliteit van het materiaal verminderen.

---

### 2. Relatieve luchtvochtigheid

- Aanbevolen opslagluchtvochtigheid: 30%–70% RV (niet-condenserend)
- Vermijd langdurige blootstelling aan een luchtvochtigheid boven 80% RV

Een hoge luchtvochtigheid kan schimmelvorming en materiaaldegradatie bevorderen.

---

### 3. Bescherming tegen zonlicht en UV- straling

- Beschermd tegen direct zonlicht opslaan
- Vermijd langdurige blootstelling aan kunstmatige UV-bronnen
- Bewaar het product in een gesloten kast of ondoorzichtige verpakking

Blootstelling aan UV-straling kan textielvezels en stiksels verzwakken

---

### 4. Bescherming tegen chemicaliën

Niet opslaan in de nabijheid van:

- Reinigingsmiddelen
- Dampen van desinfectiemiddelen
- Oplosmiddelen
- Chloorhoudende producten
- Oxiderende stoffen

Chemische dampen kunnen textielvezels aantasten

---

### 5. Mechanische bescherming tijdens opslag

- Plat of losjes gevouwen opslaan
- Geen zware apparatuur op het product plaatsen
- Niet op de vloer opslaan

Mechanische belasting tijdens opslag kan naden en stiksels verzwakken

---

### 6. Houdbaarheid

Het hulpmiddel mag niet worden gebruikt na het verstrijken van de opgegeven levensduur

Een jaarlijkse inspectie wordt aanbevolen om de blijvende integriteit van het product te waarborgen.

## Bijlage B: Transportomstandigheden

Transport omvat verplaatsing binnen het kinderdagverblijf, ziekenhuis of andere instelling

---

### 1. Algemene transportvereisten

Tijdens het transport moet het hulpmiddel worden beschermd tegen:

- Extreme temperaturen
- Overmatige luchtvochtigheid
- Direct zonlicht
- Mechanische drukbelasting
- Verontreiniging
- Ruwe behandeling

---

### 2. Intern transport

- Vervoer het hulpmiddel in een beschermende tas of een stevige container
- Draag het niet los zonder bescherming
- Plaats het tijdens verplaatsing niet in de buurt van warmtebronnen
- Vermijd langdurige blootstelling in de gangen waar direct zonlicht aanwezig is.

---

### 3. Extern transport

Bij extern transport:

- Handhaaf een temperatuur tussen 0 °C en +40 °C
- Bescherm tegen vocht
- Bescherm tegen UV-straling
- Gebruik beschermende verpakking
- Vermijd samendrukking tijdens het transport

Als het transport langer duurt dan **24 uur**, gelden de opslagtemperatuurlimieten.

---

### 4. Verpakkingseisen

Voor extern transport:

- Gebruik een gesloten beschermende verpakking
- Zorg voor bescherming tegen het binnendringen van vocht
- Gebruik schok dempend materiaal om spanning op naden en stiksels te voorkomen
- Gebruik geen vacuümcompressieverpakking

---

### 5. Inspectie na transport

Na extern transport of bij vermoede blootstelling aan ongunstige omgevingsomstandigheden moet het hulpmiddel worden gecontroleerd op:

- Gerafelde stiksels
- Loslatende naden
- Dunner wordende stof
- Verkleuring of UV- vervaging
- Vocht of schimmel
- Broosheid van het materiaal

Als een defect wordt vastgesteld, mag het hulpmiddel niet worden gebruikt.

## **6. Afwijking van opslag- of transportomstandigheden**

Als het hulpmiddel is blootgesteld aan:

- Temperaturen boven 40 °C
- Temperaturen onder 0 °C
- Hoge luchtvochtigheid (>80% RV gedurende langere tijd)
- Direct zonlicht gedurende een langere periode
- Blootstelling aan water
- Mechanische drukbelasting

Moet het hulpmiddel vóór gebruik worden geïnspecteerd.

Indien beschadiging of materiaal degradatie wordt vermoed, moet het hulpmiddel buiten gebruik worden gesteld.

---